




➔ Um auf Deine App Berichte zugreifen zu können, wähle **Hauptmenü > Berichte**.

Dein Eversense 365 CGM System erstellt automatisch vier Berichte, die Du jederzeit in Deiner App einsehen kannst. Diese Berichte können Dir und Deinem Arzt bei der Feinabstimmung Deines Diabetesmanagements helfen.




Alle Berichte können direkt über die App per E-Mail verschickt werden.

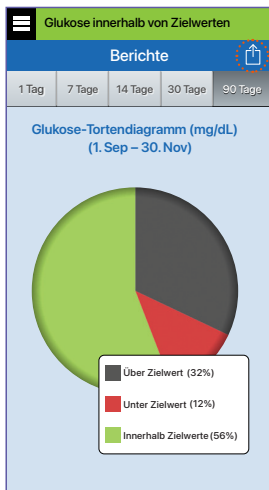


Glukose-Tortendiagramm

- Zeigt die **Zeit innerhalb, unterhalb oder oberhalb** Deines festgelegten Zielbereiches an.
- Wähle für die Anzeige zwischen 1, 7, 14, 30 oder 90 Tagen.
- Der Vergleich der verschiedenen Intervalle kann dabei helfen, Dein Diabetesmanagement zu optimieren.

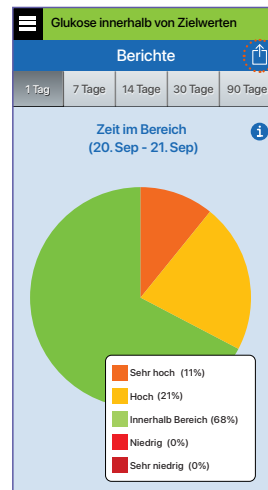


Bericht „Zeit im Bereich“

- Zeigt an, in wieviel Prozent der **Zeit Deine Glukosewerte im Zielbereich** lagen, basierend auf **standardisierten Richtlinien**.
- Mit Klick auf das Informationssymbol erhältst Du weitere Informationen.
- Wähle für die Anzeige zwischen 1, 7, 14, 30 oder 90 Tagen.

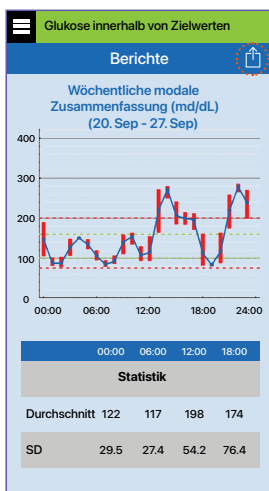

Wöchentliche modale Zusammenfassung

- Zeigt anhand der **Durchschnittswerte aus sieben Tagen eine Zusammenfassung** Deiner Glukoseinformationen in Form einer **24-Stunden-Kurve**.
- Leicht ablesbare durchschnittliche Glukosewerte zu verschiedenen Tageszeiten.
- **Rote Balken** zeigen den Bereich der Glukoseschwankungen zu einem bestimmten Zeitpunkt.
- Wenn Du nach unten scrollst, werden Dir zusätzliche Glukosestatistiken zu voreingestellten Zeiten angezeigt.

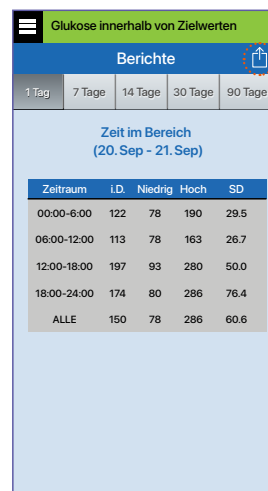

Glukosestatistik nach Tageszeiten

- Zeigt **durchschnittliche, niedrige und hohe Glukosewerte an**, basierend auf den **voreingestellten Zeiten**.
- Wähle für die Anzeige zwischen 1, 7, 14, 30 oder 90 Tagen.
- Der Vergleich der verschiedenen Zeitintervalle kann dabei helfen, Dein Diabetesmanagement zu optimieren.