

eversense 365

Continuous Glucose Monitoring System

EVERSENSE ACCOUNT anlegen



Solltest Du bereits ein Eversense Konto haben, kannst Du Schritt 1 überspringen.

- Logge Dich mit Deinen Anmeldeinformationen in die Eversense 365 App ein, überprüfe 2 und starte mit Schritt 3.

1 Erstelle Dein Eversense Konto

- Lade die App herunter. → 

Du kannst die **kostenlose Eversense 365 App** im Apple App Store oder bei Google Play herunterladen.*

* Unter <https://www.ascensiadiabetes.com/eversense/compatibility> findest Du eine vollständige Liste kompatibler Geräte.

- Nachdem Du die Lizenzvereinbarung akzeptiert hast, wirst Du aufgefordert, ein Konto mit Deiner E-Mail-Adresse und Deinem Passwort zu erstellen und Dich zu registrieren.
- Fülle die anschließend angezeigten Textfelder aus und tippe auf **WEITER** am unteren Rand jeder Seite.
- Wenn Du fertig bist, klicke auf **ÜBERMITTELN**.

2 Aktiviere Benachrichtigungen und Bluetooth

- Achte darauf, Benachrichtigungen von der App zu erlauben, damit Du Warnungen und Benachrichtigungen auf Deinem Mobilgerät empfangen kannst.
- Aktivierung von Bluetooth ermöglicht die Kopplung des Smart Transmitters mit Deinem Mobilgerät.

Herzlichen Glückwunsch! Dein Konto ist jetzt aktiviert.

3 Notiere Dir für die Zukunft die Zugangsdaten für Dein Eversense Konto:


E-Mail:

Passwort:



4 Ermögliche Deinem Arzt Zugriff auf Deine Glukosdaten

Die **Klinikfreigabe** ist eine optionale Funktion Deiner mobilen App, mit der Du die Klinik Deines Arztes über Eversense DMS Pro entweder einladen kannst oder selbst eine Einladung annehmen kannst. Dadurch können Deine Eversense Glukosdaten ärztlich überprüft werden.

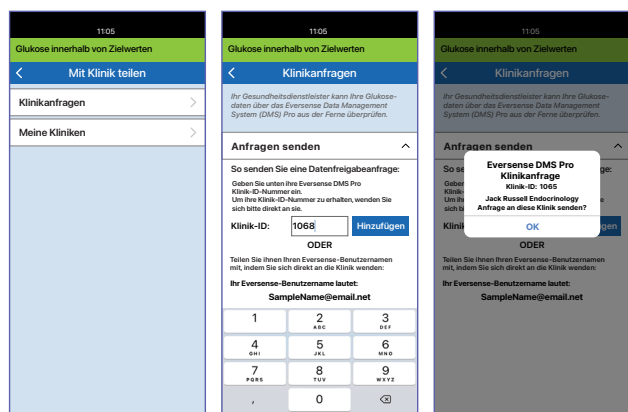

Deinen Arzt einladen:

Du benötigst die Eversense DMS Pro **Clinic ID-Nummer**. Bitte wende Dich für diese Informationen direkt an die Praxis Deines betreuenden Arztes.

1. Tippe auf **Menü > Meine Daten freigeben > Klinikfreigabe**.
2. Tippe auf **Klinkanfragen > Anfragen senden**.
3. Gebe die Eversense DMS Pro **Clinic ID-Nummer** Deines Arztes ein.
4. Tippe auf **Hinzufügen**.
5. Tippe auf **OK**, um die Einladung zu bestätigen.

Dein Arzt kann nun Deine Eversense Glukosdaten über sein Eversense DMS Pro-Konto einsehen.


5 Zugriff auf Dein Eversense DMS Konto per Computer

Du kannst Deine Glukosdaten in einer Vielzahl von Berichten und Diagrammen einsehen, indem Du Dich bei Deinem Eversense DMS Konto anmeldest.

Wichtig: Deine Anmeldedaten sind dieselben, die Du bei der Erstellung Deines Eversense Kontos verwendet hast.

6 Berichte anzeigen, drucken und per E-Mail versenden

1. Rufe <https://us.eversensedms.com> auf und gebe Deine Anmeldedaten ein.
2. Klicke im linken Navigationsbereich auf **Berichte**, um die Liste der Berichte zu öffnen.

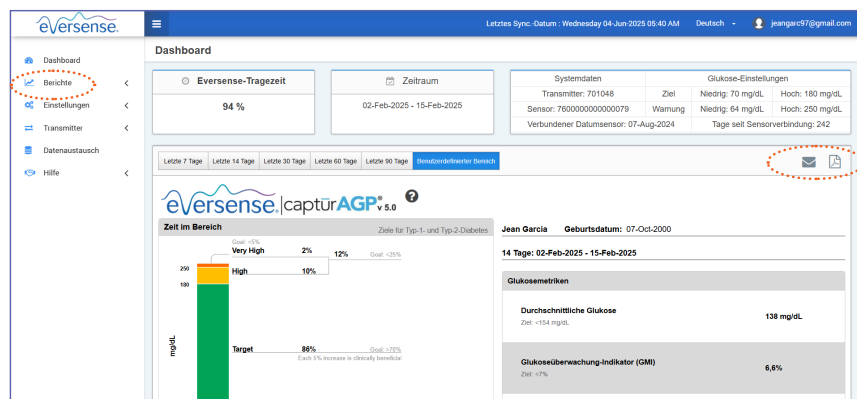

- Klicke auf das **PDF-Symbol**, um Deinen Bericht anzuzeigen und auszudrucken oder auf das **Umschlagsymbol**, um den Bericht per E-Mail zu versenden.
- Mit den Einstellungen für die **Berichtszusammenfassung** im Einstellungsmenü kannst Du einen regelmäßigen Bericht einrichten, der Dir automatisch per E-Mail zugesandt wird. Du kannst festlegen, wie oft und welche Berichte Du erhalten möchtest.

Bei Fragen erreichst Du uns unter 0800 / 50 88 844