


VORBEREITUNG auf Deinen CGM-Termin



Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Entscheidung für das Eversense® 365 CGM System!

VOR Deinem Insertionstermin

- Stelle sicher, dass auf Deinem Smartphone ein **kompatibles Betriebssystem** installiert ist. Weitere Informationen hierzu findest du unter: <https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility>
- Lade die **Eversense 365 App** auf Dein Smartphone herunter.  Hier sind die Links zum Download der App:



Apple App Store®

<https://apps.apple.com/de/app/eversense-365-cgm/id6737488431>



Google Play™ Store

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.senseonics.eversense365.ous>

- Erstelle Dein **Eversense-Konto** in der App.
 - Wähle die Option „Ich habe keinen Smart Transmitter“.
 - Wähle die von Dir gewünschte Einheit (mg/dl oder mmol/l).
 - Notiere Dir Deinen Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und das Kennwort für Dein Eversense-Konto:

Mein Benutzernamen (E-Mail-Adresse)

Mein Kennwort

Nachdem Du Dein Konto eingerichtet hast, erhältst Du zeitnah einen **Bestätigungslink per E-Mail**. Diesen musst Du innerhalb von 72 Stunden anklicken, um Dein Konto zu aktivieren.

AM TAG der Insertion

- Trage am besten ein lockeres, ärmelloses oder kurzärmeliges Oberteil.
- Bringe bitte Folgendes mit:
 - Dein Smartphone, **voll aufgeladen** und **mit installierter Eversense 365 App**.
 - den Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und das Kennwort für Dein Eversense-Konto.

Außerdem **WICHTIG**

- In den ersten fünf Tagen solltest Du es vermeiden zu baden, zu schwimmen oder anstrengende Aktivitäten zu unternehmen.

Wir sind für Dich da.



Telefon

0800 / 50 88 844 (kostenfrei)



E-Mail

support.de@eversenseddiabetes.com

Senseonics

Vertrieb durch:
Senseonics Deutschland GmbH
Am Kabellager 11, 51063 Köln
www.eversenseCGM.de

Hergestellt von: Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA
© 2026 Senseonics, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie unter
<https://global.eversenseddiabetes.com/safety-info/>

Wir kümmern uns um Ihre Fragen.
Eversense Service Team
0800 / 50 88 844
support.de@eversenseddiabetes.com